

Estimado cliente,

Agradecemos a sua confiança.

A nossa equipa faz todo o possível para o satisfazer a 100%.

Se tiver quaisquer perguntas ou observações, estamos à sua disposição de segunda a sábado, das 9:00 às 19:00 horas.

contact@bebealis.com




Impresso em França - V02/2023

BEBEALIS®, uma marca David&Co
16 impasse des magnolias - 41 000 Villebarou - France

BEBEALIS



Facilita a sua vida !

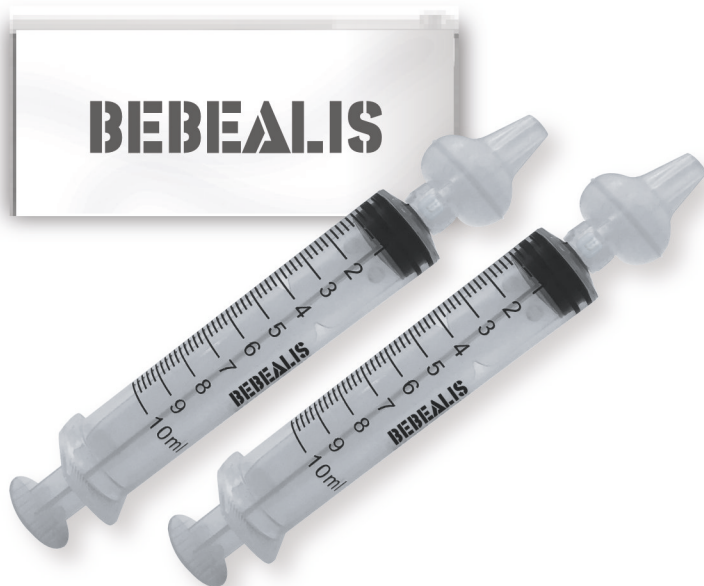


Distribuído em Portugal por:
Naturalmente Bebê Lda.
geral@naturalmentebebe.pt

Recomendado a
partir de 4 meses



Como descarregar grátis os seus desenhos para colorir ?

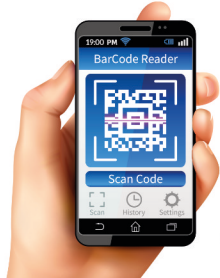

se não consegue aceder ao livro electrónico com o seu código QR, utilize este link

<https://bebealis.systeme.io/accueil>

ou contacte-nos em contact@bebealis.com

Instruções de utilização da seringa nasal

Preparar a seringa a agulha o soro fisiológico e a ponta nasal.



Aspirar o soro com a agulha e substituí-la pela ponta nasal.



Sente o bebé com a cabeça inclinada ligeiramente para a frente, e injecte o soro na narina para expelir o muco e fazer a limpeza nasal.



Limpe o nariz do bebé com um toalhete adequado*.



*Depois de utilizar a seringa lave bem com água e sabão - Quando necessário, proceda à substituição do bico de silicone.